

2 1		
	<b>TCBS Agar</b>	

:

:

TCBS آگار Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar محیطی انتخابی برای جداسازی ویبریوکلرا و ویبریوپاراهمولیتیکوس و نیز دیگر ویبریوها است. مہار باکتری های گرم مثبت با افزودن Oxgall (صفرای گاوی، محتوی مخلوطی از نمک های صفرای و Sodium Cholate)

pH

pH

۳- نمونه اولیه :

(Cary & Blair)

:

TCBS

:

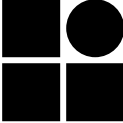
TCBS

(pH = / ) NaCl %

TCBS

° C

TCBS

2 2		
	<b>TCBS Agar</b>	

TCBS

° C

± ° C

- توجه: از زمان تهیه محیط *TCBS* نباید بیش از یک هفته گذشته باشد. همچنین محیطهای *TCBS* باید در کیسه های فریزر در بسته در یخچال نگهداری شوند.

:(QC)

:*Vibrio Cholerae* ATCC 9459

:*Vibrio parahaemolyticus* ATCC 17802

:*Escherichia coli* ATCC 25922

:*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 10145

:*Streptococcus faecalis* ATCC 29212